



**HISPAMAP**

Sociedad Hispano Americana de Psicología Aplicada

Número de Registro de entidades del Ministerio del Interior del Reino de España: 164.889

**DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA**

Apartado de Correos n 41.061 Madrid 28.080 España. ☎ (+34) 91 797 55 11

http: [www.hispamap.net](http://www.hispamap.net) - [correo@hispamap.net](mailto:correo@hispamap.net)

### EQUIPO DE BIOINFORMACIÓN

## «BRAIN POWER PRO»



### INFORMACIÓN GENERAL



El **BRAIN POWER PRO** es un monitor fisiológico basado en Windows que detecta ondas cerebrales y otras señales de respuestas biológicas. La información musical retroactiva y las proyecciones visuales cambian en respuesta a las variaciones en las señales. Las señales son analizadas gráficamente a través del software para una fácil comprensión. Los usuarios domésticos y profesionales aprenden y enseñan cómo controlar los estados mentales.

Este sistema monitoriza 4 señales indicadoras biológicas en un solo equipo:


1. · Ondas cerebrales (E.E.G. - Electroencefalograma)
2. · Respuestas psicogalvánica (G.S.R. - Respuesta galvánica dérmica)
3. · Respuestas musculares (E.M.G. - Respuesta de acción muscular)
4. · Frecuencias cardiacas (E.C.M. - Electrocardiograma)

En realidad va a tener cuatro equipos en uno sólo, a un precio muy reducido comparados al coste de estos equipos en el mercado. Así usted va a contar en una sola unidad con:

1. **Un Electroencefalógrafo,**
2. **un Electrocardiógrafo,**
3. **un Electromiógrafo y**
4. **un Electropsicogalvanómetro...**

Como puede ver se trata de una unidad de trabajo excepcional **dirigida a la psicoterapia, bioinformación y la investigación**. El «Brain Power Pro» consta de electrodos, hardware de computadora y software de computadora. Los electrodos que recogen señales biológicas son fijados al cuerpo. El hardware «Brain Power Pro» transmite las señales hacia una computadora u ordenador a través de un cable serial. **“WaveWare”**, el software «Brain Power Pro» basado en Windows, procesa las señales para el análisis, la proyección, y la información retroactiva.

El hardware «Brain Power Pro» tiene un canal dedicado solo para la lectura de resistencia de piel de (GSR) y varios canales multipropósito. los canales multipropósito de bajo ruido leen las señales del cerebro, el corazón, y músculos. Cada canal multipropósito puede ser individualmente configurado para recolectar el tipo requerido de señal biológica. El hardware «Brain Power Pro» viene en dos versiones: «Brain Power Pro» 1 y 2

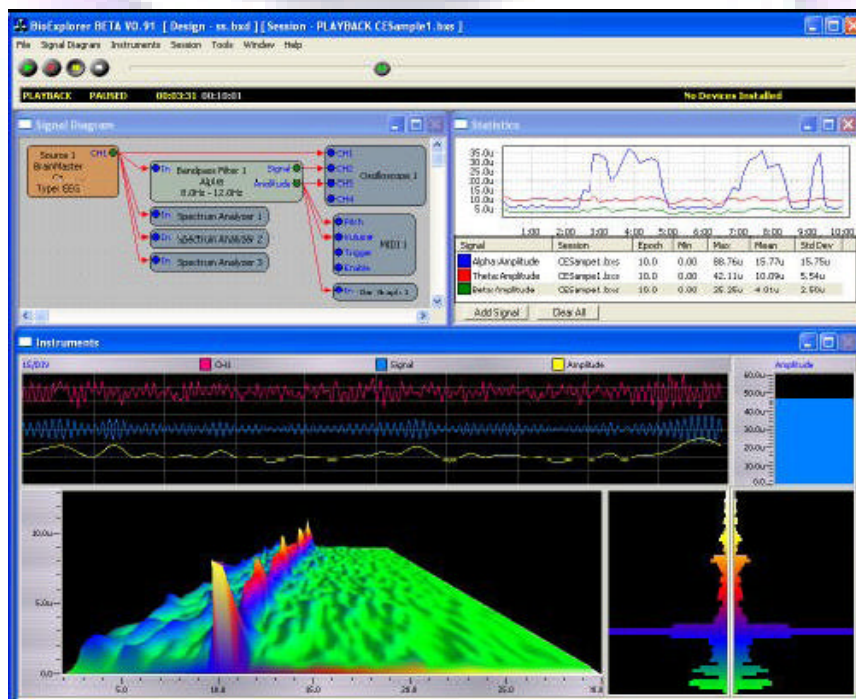

## WAVE WARE: EL SOFTWARE DEL «BRAIN POWER PRO» PARA WINDOWS


1. -Se puede utilizar en Windows 95, 98, 2000, Y XP y VISTA
2. -Fácil de usar, incluye un manual ilustrado de 150 páginas.
3. -Viene con protocolos preprogramados que se encarga de las necesidades de la mayoría de los usuarios, y usted rápidamente puede diseñar protocolos personalizados.
4. -Exporta datos procesados a hojas de cálculo para un posterior análisis.
5. -Las variables de sonido incluyen notas, escalas, tono, clave, volumen y elección del instrumento.
6. -Los resultados visuales incluyen música, tonos, gráficas, barras, y espectrograma, así como también datos puros y procesados.
7. -Los modos de información retroactiva incluyen condicional, proporcional, frecuencia dominante y coherencia.
8. -Protocolos GSR, corazón y muscular.
9. -Los motores de análisis de frecuencia incluyen tanto FFTS como filtros digitales.

### USTED RECIBE:

- o -El Hardware «Brain Power Pro» Pro (ver imagen arriba).
- o -El Software WaveWare.
- o -Dos juegos de dos electrodos para la cabeza y un juego de dos electrodos para las orejas.
- o -La pasta Ten20 y el gel NuPrep para aplicar los electrodos.
- o -Cable Serial.
- o -Tres cables de conexión y conducción.
- o -Tres paquetes de 6 electrodos desechables para EMG y ECG y clips para el dedo para GSR (respuesta galvánica).
- o -Manual de Usuario.

Se pueden reponer cualquiera de los componentes y materiales cuando se hayan gastado. También puede comprarlos en tiendas de materiales médicos y quirúrgicos (electrodos, cremas y pasta para los electrodos...)

**GARANTÍA DE UN AÑO**  
**a partir de la fecha de la adquisición.**

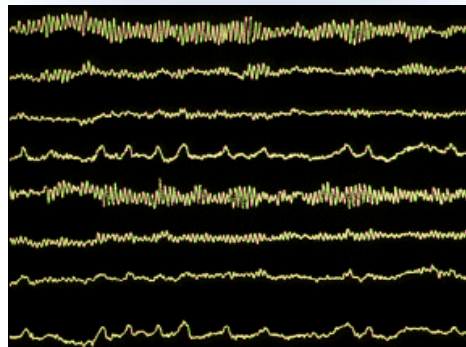

Frecuencias cerebrales

## PRECIO

**2.990 €uros**

(Dos mil novecientos noventa euros o su equivalente en moneda del país desde el que se efectúe el pago.)

- o Se abonará el precio total o al 50% por adelantado, para solicitar el aparato al fabricante y su envío al destinatario.
- o Se abonará 7% más en concepto de I.V.A. dentro de la Unión Europea, para la emisión de factura oficial.

## PEDIDOS Y MÁS INFORMACIÓN:

«HISPAMAP»

[www.hispamap.net/pedidos.htm](http://www.hispamap.net/pedidos.htm)

Teléfonos en Madrid, España:

**(+34) 91 797 55 11 y (+34) 677 09 60 08**

**Fax : (+34) 91 797 55 11**

- o **Envíos a cualquier parte del mundo** a través de **UPS – SEUR – MRW – FEDEX** o Correos de España ([www.correos.es](http://www.correos.es)) con seguro adicional para la mercancía, si se desea.

## INFORMACIÓN DE PAGOS:

**[webs.ono.com/zor/pagos.pdf](http://webs.ono.com/zor/pagos.pdf)**

(no es necesario que ponga delante las "w.w.w.")

http:// [www.hispamap.net](http://www.hispamap.net)

